


SlingBarSpreader M

SystemRoMedic™

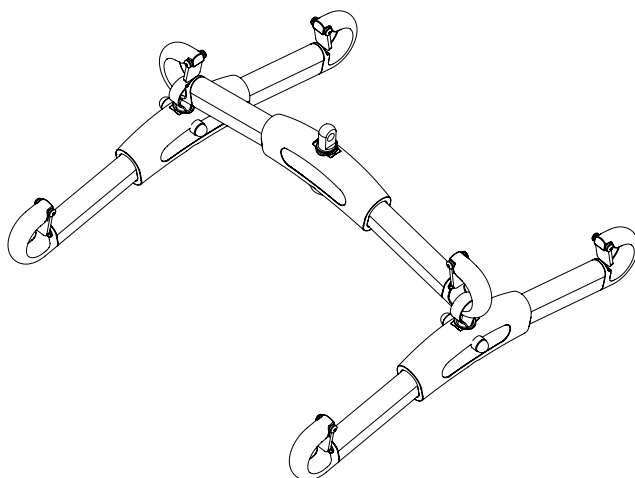

Manual - Norsk



**Maks belastning:
300 kg/par**

SlingBarSpreader M er sidebøyler som benyttes i kombinasjon med en løftebøyle på stasjonær-, eller mobiløfter. Sidebøyler benyttes for å gi mer plass i løfteselen og egner seg spesielt godt for overvektige samt pasienter med smerter.

I Handicares produktserie SystemRoMedic inngår blant annet løftere og løfteseler. SystemRoMedic innebærer en helhetstankegang rundt forflytninger som er oppdelt i fire kategorier: overflytning, posisjonering, støtte og løf.



Kontroll av funksjon

Visuell inspeksjon

Gjør regelmessige funksjonskontroller. Kontroller at materialet er helt og skadefritt. Ved tegn på slitasje skal produktet kasseres.



Les alltid manualen

Les alltid manualene for alle hjelpemidler som benyttes i en forflytning.

Oppbevar manualen tilgjengelig for brukere av produktet.

La aldri brukeren være alene under forflytningsmomentet.

Unngå utglidningsrisiko eller ubehag ved å være grundig når man prøver løfteselen. Huk først på løfteselens ryggløkker på løftebøylen, huk deretter på beinløkkene. Benytt en utprøvd løftebøyle.

Det er alltid den minste maksimumslasten på det respektive produktet i den sammensatte løfteenheten som er avgjørende. Kontroller alltid tillatt maksimumslast på løfter og løftetilbehør før bruk og kontakt din forhandler hvis du har spørsmål.



handicare

Produktbeskrivelse av SlingBarSpreader M

SlingBarSpreader M er produsert i aluminium.

SlingBarSpreader M kombineres med godkjent Handicare stasjonær-, eller mobiløfter. Løftekrokene er utrustet med avkrokingsvern. SlingBarSpreader M benyttes alltid i par og i kombinasjon med godkjent Handicare løftebøyle.



Viktig informasjon!



- SlingBarSpreader får kun benyttes i par.
- Opphengsløkkene får ikke vris.
- Den får ikke benyttes som løftebøyle eller kobles på lenken på løftenheten.
- Løfteselens ryggløkker skal plasseres på den løftekroken som er merket med hovedsymbolet.
- Løfteselens ryggløkker skal plasseres på den løftekroken som er merket med hovedsymbolet.




Montering

Huk på opphengsløkken på løftekroken på løftebøylen. Gjør tilsvarende på den andre siden.

Obs! Kontroller at hovedsymbolene på SlingBarSpreader er på samme side som løftebøylen.

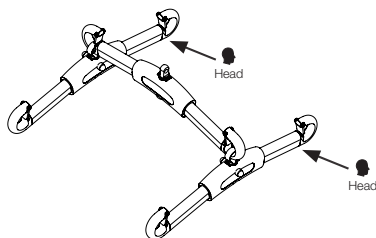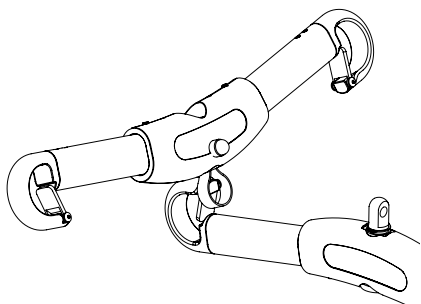

Bruk

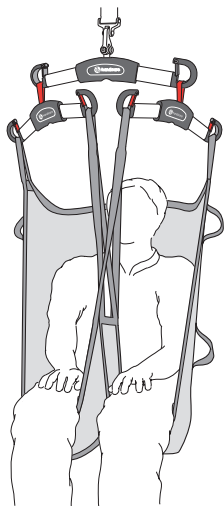

Sett løfteselen på brukeren, se manualen for aktuell løftesele.

Plasser ryggløkkene på den siden av SlingBarSpreader M som er merket med et hovedsymbol. Båndene plasseres i den andre enden.

Obs! Ved bruk av løftesele med 3-punktsopphengning, plasseres den midterste opphengsløkken i samme ende som ryggløkken. De skal ikke plasseres på løftebøylen som SlingBarSpreader M er montert på.

Maksimumslast

De ulike produktene i den sammensatte løfteenheten (løfter, løftebøyle, løftesele, vekt og eventuelt annet løftetilbehør) kan ha forskjellige maksimumslaster. Det er alltid den minste maksimumslasten på det respektive produktet i den sammensatte løfteenheten som er avgjørende. Kontroller alltid tillatt maksimumslast på løfter og løftetilbehør før bruk og kontakt din forhandler hvis du har spørsmål.

Rengjøring

Ved behov, rengjør løftebøylen med varmt vann eller desinfeksjon. Benytt ikke rengjøringsmidler som inneholder fenol eller klor. Dette kan skade materialet.

Ved spørsmål om produkter og bruken av disse, kontakt din lokale distributør. Se www.handicare.com for en komplett distributørliste. Sjekk at du alltid har rett versjon av manualen tilgjengelig. De siste versjonene kan du laste ned fra vår hjemmeside: www.handicare.com

Handicare AB

Veddestav. 15. Box 640 Tel: +46 (0)8 -557 62 200

SE-175 27 Järfälla

Fax: +46 (0)8-557 62 299

SWEDEN

Internet: www.handicare.com

E-mail: info@handicare.se

